

# Teeth Whitening Starter Kit



## Weissere Zähne schon nach 30 Minuten

*Beconfi®Dent, peroxidfreies Zahnbleaching-Gel (Teeth Whitening Gel), wirkt sehr effektiv und schonend. Das Gel entfernt Verfärbungen & Flecken von den Zähnen, enthält keine Säuren und ist pH-neutral. Somit wirkt das Gel schonend auf Mund und Zähne und verhindert eine Abnutzung des Zahnschmelzes.*

# Anwendung

Für beste Ergebnisse, bitte Anleitung vor Behandlungsbeginn sorgfältig lesen.

**1. Formung der Zahnschiene:** ca. 3 Sekunden in 80° warmes Wasser tunken, abschütteln und dann über die Zähne platzieren (keine Brenngefahr). Die Schiene mit Zunge und Fingern gegen die Zähne pressen. Gleichzeitig Luft wegsaugen, um bestmögliche Passform zu erlangen. Falls es nicht gelingt, bitte mit derselben Schiene das Vorgehen wiederholen. Erst bei bestmöglicher Passform die Schiene im kalten Wasser spülen.

## DIE GRIFFFLIPPE ABSCHNEIDEN

**2. Vor jeder Behandlung die Zähne leicht ohne Zahnpasta putzen.**

**3. Anwendung – Alternative 1:** Anwendung mit dem Finger: Waschen Sie Ihre Hände und geben Sie einen Tropfen Gel auf Ihre Fingerspitze. Anschließend geben Sie das Gel auf die Zähne, die Sie bleachen möchten und verteilen es sanft. Dann platzieren Sie die Zahnschiene über dieser Zahnreihe. Sie können beide Zahnreihen gleichzeitig oder nacheinander behandeln.

**Anwendung – Alternative 2:** Anwendung mit der Zahnschiene: Geben Sie von einer Seite zur anderen einen dünnen Gel-Wulst direkt in die vordere Kante der Zahnschiene. So, dass das Gel die Vorderseite aller Zähne bedeckt. Danach platzieren Sie die Zahnschiene auf die Zahnreihe, die Sie behandeln möchten. Beide Zahnreihen können gleichzeitig oder nacheinander aufgeheilt werden.

**4. 15 Minuten einwirken lassen**

**5. Zahnschiene entfernen und Mundhöhle mit Wasser spülen.** Die Zähne leicht ohne Zahnpasta putzen.

**6. Behandlung einmal täglich über 10 Tage wiederholen,** oder bis zur Zufriedenheit. Das Produkt kann bis zu 20 Tage innerhalb 3 Monaten benutzt werden. Tragen Sie das Gel nicht zu dick auf, ca. 0,5 ml pro Behandlung genügen. Der Inhalt der Gel-Tube reicht für 8-10 Behandlungen.

**Hinweis:** Die Zahnschienen müssen nicht perfekt sitzen. Sie haben lediglich die Aufgabe, das Gel während der Behandlung auf den Zähnen zu halten, damit es nicht vorzeitig durch Zunge oder Speichel abgelöst wird. Speichelbildung bei der Behandlung ist normal und wichtig, damit das Gel seine volle Wirkung entfalten kann.



## Sicherheitshinweise

Bei abnormaler Einnahme kontaktieren Sie die Giftzentrale (145) und geben Sie den Verpackungsinhalt an. Behandlung abbrechen bei gereiztem Zahnfleisch. Das Produkt soll nicht bei entzündetem oder blutendem Zahnfleisch benutzt werden. Sie sollten das Produkt auch vermeiden, falls Sie eine Zahnsperre tragen oder allergisch gegen die Wirkstoffe sind. Bitte die Produkte kühl und trocken aufbewahren.

## Für ein erfolgreiches Ergebnis

Erforderliche Anzahl der Behandlungen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, ist individuell. Das Ergebnis ist von der Verfärbung und den genetischen Voraussetzungen abhängig. Bitte beachten Sie, dass Zahnverschulungen, Zahnfüllungen usw. nicht aufgeheilt werden. Kleine weisse Flecken können direkt nach der Behandlung auftauchen. Diese lösen sich normalerweise nach 4-6 Stunden auf. Die Behandlung wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Ggfs. gibt es das Bleaching-Gel auch als Refill (Nachfüllpackung). Für optimale und dauerhafte Ergebnisse wird die tägliche Folge-Pflege mit Beconfid® Dent Multifunctional WhiteAmin™ Zahnreinigungsgel empfohlen. Diese enthält auch gesunde Vitamine. Eine weitere nützliche Hilfe bei der Zahnaufhellung ist unser Touch Up Pen. Mit ihm können Sie gut besonders hartnäckige Flecken und Zahn-Zwischenräume behandeln. Er ist auch ideal für unterwegs oder die Behandlung zwischendurch.

## Allgemeine Hinweise

- Vermeiden Sie Nikotin, Fruchtsäfte, Tee, Kaffee und andere farbigen Getränke bis zu vier Stunden nach der Behandlung.
- Nur für Erwachsene – Zahnaufhellung ist für Personen unter 18 Jahren nicht empfohlen.
- Bei Schwangerschaft oder Stillen, fragen Sie Ihren Arzt vor Beginn der Behandlung.
- Halten Sie alle Zahnbleaching-Produkte und Zubehör außer Reichweite von Kindern und Tieren.
- Das Produkt enthält Natriumfluorid!

## Aufbewahrung

- Haltbarkeit bei Raumtemperatur ca. 2 Jahre (ungeöffnet). Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten
- Haltbarkeit ab Öffnung der Tube liegt bei 6 Monaten (im Kühlschrank).

## Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

## Neue Zahnbleaching-Gel Tube

- Mehr Hygiene
- Einfaches Anwenden
- Ideal zum Mitnehmen
- Die Tube ist nicht zu 100% mit Gel befüllt; die Luft soll das Gel dickflüssig halten, was die Bleaching-Behandlung unterstützt.

## Weitere Produkte für Ihr weißes Lächeln

Weitere Informationen über alle unsere Produkte unter [www.beconfident.ch](http://www.beconfident.ch) & [www.beconfident.de](http://www.beconfident.de). Bei Fragen, bitte Kundendienst kontaktieren: [kundenservice@beconfident.de](mailto:kundenservice@beconfident.de)

## Nuancenguide



beconfi<sup>®</sup> Dent

Makes you smile

[www.beconfident.de](http://www.beconfident.de)