



Bedienungsanleitung  
für beheizte Bandagen  
AB15, WB25, KB35, SB45,  
RB66, NB66, NSB75, EB85

## Vielen Dank ...

dass Sie sich für den Kauf unserer mc heat® beheizten Bandage entschieden haben.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen beheizten Bandage haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie bitte die Hinweise.

## Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, da sonst ggf. Personen- oder Sachschäden entstehen können und ggf. die Garantie aufgrund von unsachgemäßer Benutzung erlischt.

- Wir empfehlen, dass Schwangere, Kinder, Personen mit Herzschrittmachern oder mit anderen gesundheit-



lichen Problemen, vor dem Benutzen der beheizten Bandage einen Arzt zu evt. Gesundheitsrisiken befragen.

- Wenn Sie sich unwohl fühlen oder irgendwelche unangenehmen Randscheinungen verspüren, schalten Sie die beheizte Bandage aus und befragen Sie einen Arzt, bevor Sie diese weiterbenutzen.
- Verwenden Sie diese beheizte Bandage niemals, wenn diese nass sein sollte.
- Verwenden Sie die beheizte Bandage nicht während des Schlafens.
- Stecken Sie keine Pins oder Nadeln in die beheizte Bandage, da dieses zu Beschädigungen der Heizelemente und/oder Kabeln führen kann.
- Verwenden Sie die beheizte Bandage nicht auf empfindlichen Hautflächen.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.


- Schalten Sie Bandage nicht ein, wenn diese zusammengeklappt ist.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt des Bedienelements mit Feuer oder anderen heißen Wärmequellen.
- Der Akku ist für ca. 500 Ladungen ausgelegt.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Ladeteil, um den Akku aufzuladen.

### Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung unbedingt **mehr als 5 Std.** auf. Der Akku ist nur zur Qualitätskontrolle in der Fabrik vorgeladen worden. Alle weiteren Akkuladungen dauern ca. 4 Stunden bis der Akku voll aufgeladen ist. Verbinden Sie das Ladegerät zuerst mit dem Akku und stecken dann das Ladegerät in die Steckdose. Das Ladegerät ist für 110/230V ausgelegt.

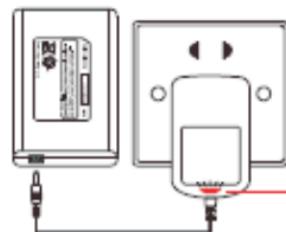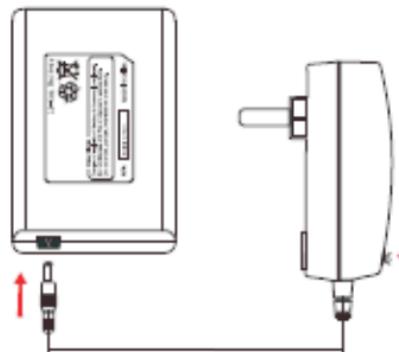

rote LED = laden

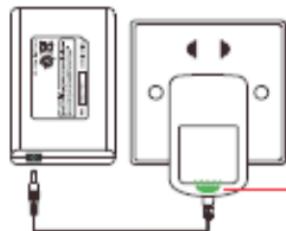


grüne LED = voll aufgeladen

## Akku/Bedienelement anschliessen



Suchen Sie das Anschlusskabel in der kleinen Tasche..

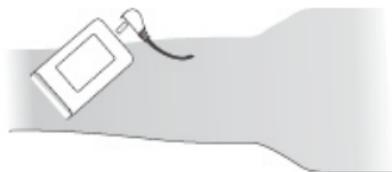


Schliessen Sie das Bedienelement an.




Stecken Sie das Bedienelement in die Tasche.

## Einschalten und Temperatur wählen

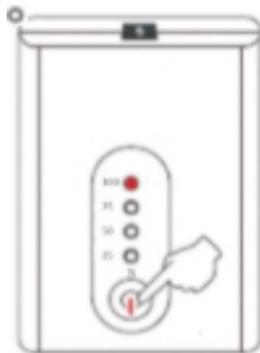


Halten Sie die Ein/Aus Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die rote LED aufleuchtet.

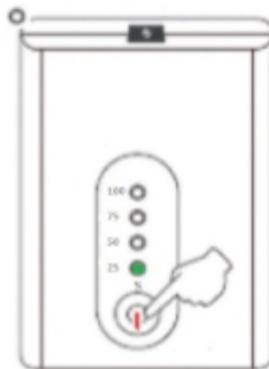


Durch mehrfaches kurzes Drücken der Ein/Aus Taste, können Sie die Temperatureinstellung verändern. Grün = niedrig

## Temperatur wählen

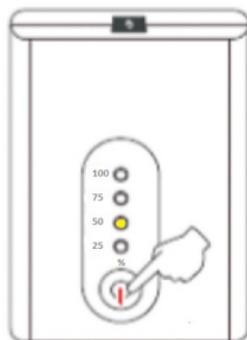


Durch mehrfaches kurzes Drücken der Ein/Aus Taste, können Sie die Temperatureinstellung verändern.  
Gelb = Medium

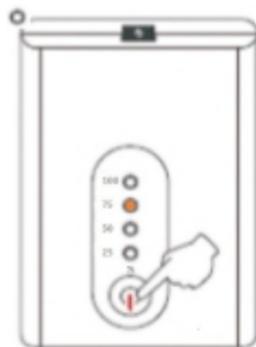


Durch mehrfaches kurzes Drücken der Ein/Aus Taste, können Sie die Temperatureinstellung verändern.  
Orange = Hoch

## Temperatur wählen und Ausschalten

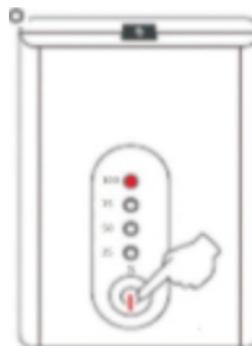

Durch mehrfaches kurzes Drücken der Ein/Aus Taste, können Sie die Temperatureinstellung verändern.  
Rot = Maximal

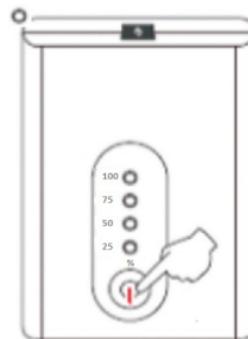

Um das Bedienelement auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus Taste für 2 Sek. gedrückt, bis die LED erlischt.

## Ladezustand Akku prüfen

Wenn der Akku weder mit der Bandage noch mit dem Ladegerät verbunden ist und Sie die POWER Taste gedrückt halten, zeigt der Akku den Ladezustand an.

## Waschen und Pflegen

- Entfernen Sie vor dem Waschen das Bedienelement/Akku.
- Es wird ausdrücklich Handwäsche in kaltem Wasser empfohlen mit milder Seife oder Feinwaschmittel.
- Verwenden Sie niemals Bleichmittel jeglicher Art.
- Hängen Sie die beheizte Bandage zum Trocknen auf. (nicht im Trockner trocknen)
- Wringen Sie die beheizte Bandage niemals aus und bügeln Sie diese niemals, da hierdurch die Heizelemente beschädigt werden können.

## Garantie/Service

Versuchen Sie niemals die beheizte Bandage, das Bedienelement oder das Ladegerät im Schadensfall selber zu reparieren. In diesem Fall erlischt jeglicher Garantieanspruch. Wenden Sie sich bitte an mc heat®. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet von dem Verkaufsdatum an den ersten Endverbraucher. Als Garantiebeleg wird ein Kassenbon mit Datumseindruck oder Rechnung als Nachweis benötigt. Handgeschriebene Quittungen sind als Garantiebeleg nicht zulässig. Die Garantie schließt Schäden/Defekte aus (einschließlich und ohne Ausnahme), die durch scharfe Gegenstände, Biegen, Zusammenpressen, Fallen lassen, Wasser etc., die durch Fahrlässigkeit, unzulässigen Gebrauch/Missbrauch, einschliesslich Nutzung entgegen dieser

## Garantie/Service

Bedienungsanleitung, sowie Einsatz von nicht Original Zubehörteilen und Fremdeingriff entstehen.

Kontaktieren Sie mc heat® in jedem Fall zuerst, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Probleme mit der beheizten Bandage haben.

Sie erreichen uns per e-mail unter [info@mc-heat.com](mailto:info@mc-heat.com).

Wir werden versuchen mit Ihnen gemeinsam das Problem zu lösen. Sollte es erforderlich sein, dass Sie die Bandage an uns einschicken müssen, erhalten Sie eine RMA Nr.. Diese muss zwingend auf dem Rücksendekarton außen und gut sichtbar notiert werden. Es können keine Rücksendungen ohne diese RMA Nr. angenommen werden.

## Umwelthinweis/Entsorgung

Diese beheizte Bandage darf nach ihrer Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie diese Bandage dem Elektroschrott Recycling System zu. Entsorgen Sie diese bitte bei den entsprechenden Sammelstellen. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer Stadt/Gemeinde etc.

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien/Akkus zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden. Natürlich können Sie den hier im Lieferumfang enthaltenen Akku auch kostenfrei an uns zurücksenden.

## Umwelthinweis/Entsorgung

Schadstoffhaltige Batterien sind mit diesen Zeichen markiert:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber



## Technische Daten

Technische Daten Ladeteil:

Eingang: 100 /240V AC 50/60Hz 0,25A

Ausgang: 8,4V DC 0,7 A




Technische Daten Bandage:

Eingang: 7,4 V Lithium Ionen Akku


Bandagenmaterial: 97% Neopren

3% Polyamid


## Rücken-/Fußgelenkbandage

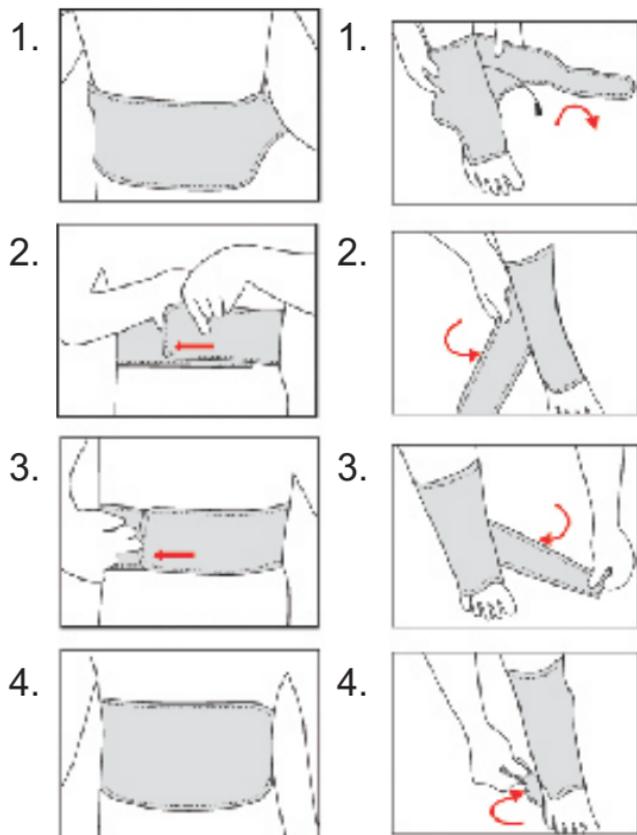

## Ellbogen-/Schulterbandage



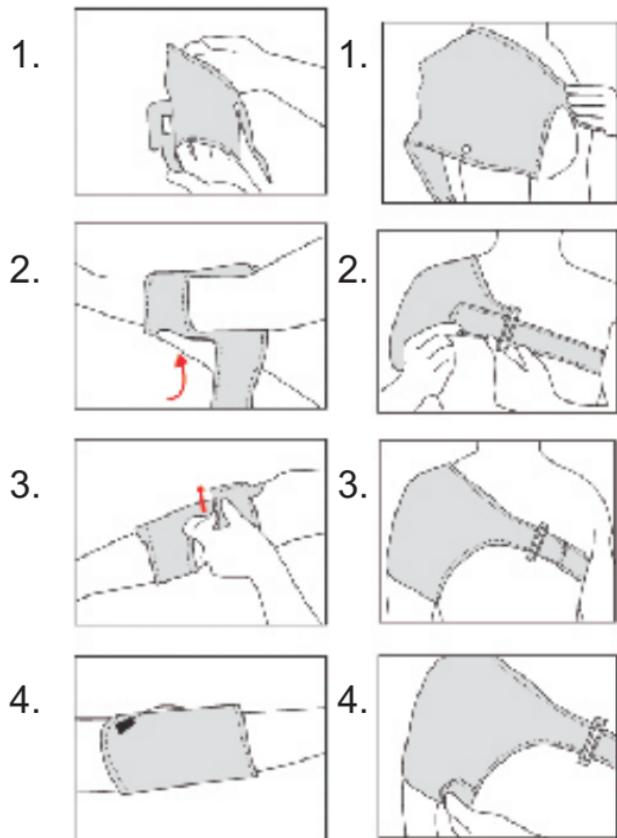


## Nacken-/Nacken-Schulterbandage

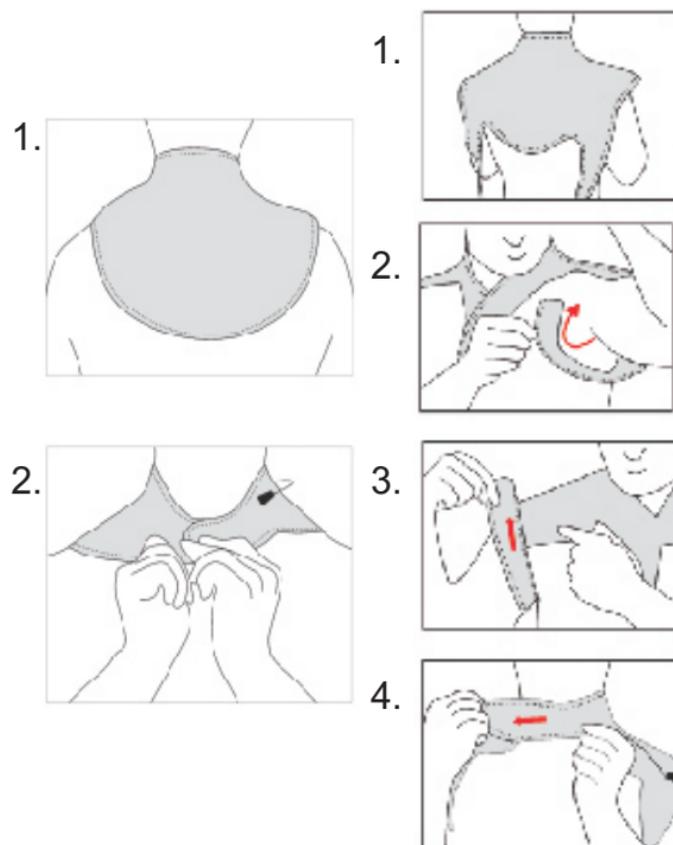

## Hangelenk-/Kniebandage

## Kontaktadresse

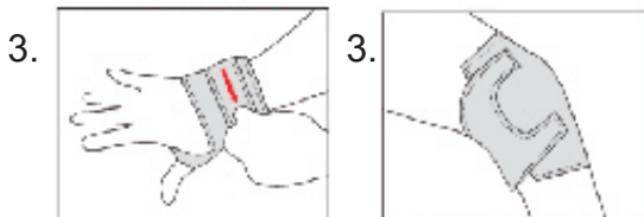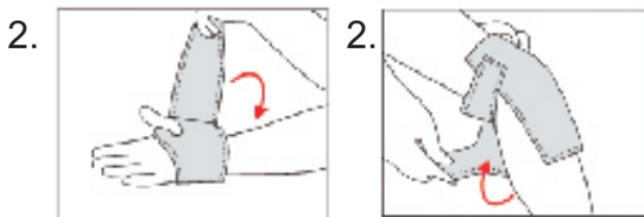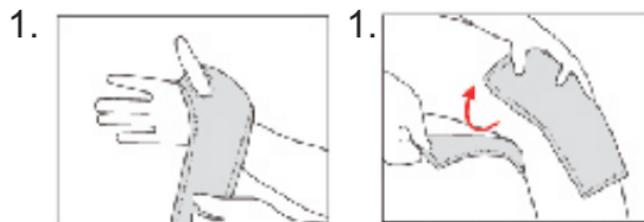

MM-Store GmbH  
Gesandtenstrasse 6  
D-93047 Regensburg  
+49-(0)941-59937226  
[www.mc-heat.com](http://www.mc-heat.com)  
[info@mc-heat.com](mailto:info@mc-heat.com)

Weitere interessante beheizte  
Produkte, finden Sie im Internet auf  
der Seite [www.mc-heat.com](http://www.mc-heat.com)